

スワズ・フレーム取扱説明書

お買い上げいただきましてありがとうございます。

この製品を正しく安全に使い、機能を充分生かしていただくため、ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。

保護者の皆様へ：お子様のご使用になる場合には、この説明書をよくお読みになり、お子様のご理解できるようご説明ください。

この説明書は、読み終わった後も大切に保管してください。

絵表示について

この取扱説明書の絵表示と意味は次のとおりです。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

- ⚠ 警告：記載事項をお守りいただかないと、死亡または重傷を負う可能性のあることを示しています。
- ⚠ 注意：記載事項をお守りいただかないと、軽傷またはフレーム破損の可能性のあることを示しています。
- ⊘ ：してはいけない禁止行為を示しています。
- ❗ ：守っていただくべき義務行為を示しています。

⚠ 警告

- ⊘ このフレームは、保護メガネとして使用できません。接触ブルーのあるスポーツや強い衝撃を受ける可能性がある場合には使用しないでください。破損等により顔面等を負傷する危険性があります。
- ❗ レンズの濃淡に係らず太陽や溶接などの強い光線を直視しないでください。目を痛める危険があります。特にお子様の使用にあたっては保護者の方が十分注意してください。
UVカット加工の製品は、日中の光線のまぶしさや通常使用での有害紫外線を防ぐことはできませんが、業務用の紫外線保護メガネとしては使用できません。
- ⊘ 慣れないうちの運転は距離感がつかめず危険です。メガネに慣れてから車等の運転を行ってください。

使用上の⚠注意

- ❗ メガネは鼻、こめかみ、耳の3点に均等にかかるよう装着してください。
- ❗ 片手で乱暴に取り扱おうと、枠（フレーム）、レンズとつる（テンプル）にムリが生じますので、フレームは必ず両手でかけはずししてください。
- ❗ レンズは、指紋などで汚さないためにも直接手を触れないようにしてください。汚れた場合は、「お手入れ、保管方法」を参照ください。
- ❗ メガネを置くときは、レンズ凸面を上向きにしてください。下向きにしますとキズの原因になります。
- ⊘ 暖房器具の近くや、高温時の車内など温度の高い所（50℃以上）には、メガネを置かないでください。急激な温度変化にあうと変形したり表面層のはがれや、ヒビ割れの生じる原因となります。
- ⊘ ベンジン、シンナー等は汚れ取りに使用しないでください。プラスチック部分や塗装部分の劣化、変色、変質の原因となります。

お手入れ、保管方法

- ❗ レンズが汚れた場合には、水道水でレンズ面を指でなでるように軽く洗い流し、その後水分を柔らかい布で押し取るように拭き、自然乾燥させてください。
- ❗ メガネを保存する際には付属の布袋もしくはケースに入れてください。保管中や、輸送中に硬いもの（例えば金属品、バックル、ファスナーまたは角のあるプラスチック等）がレンズ面に直接触れないようにご注意ください。フレームに外圧を加えると変形することがありますので、無理な外圧を加えないように注意してください。
- ❗ 防虫剤、トイレ・浴用洗剤、化粧品、整髪料、薬剤などの入った場所に長い間保管しておく、レンズ、フレーム共に劣化、変質、変色の原因となります。
- ❗ メガネを快適且つ安全にご使用いただくために、一年に一度は必ず「視力測定」・「フィッティング調整」・「消耗品の点検や交換」・「レンズとフレームの劣化」等について、お買い求め店で定期点検を受けてください。

アレルギー体質の方へ

- ❗ フレームが肌に触れる箇所にかゆみ、かぶれ、湿疹など異常があるとき、または異常が現れたときにはご使用をやめ、医師の診断を受けてください。体質にあった部品またはフレームと交換する事が必要です。
- ❗ フレームは経年変化によって、表面層のはがれやヒビ割れによる素材の露出や変色が起こる場合があります。そのままお使いいただくとアレルギーを起こす可能性があります。一年を目安にお買い求め店で点検を受けてください。

修理・改造の⚠注意

- ⊘ ご自身による修理、改造は安全上の問題がありますのでおやめください。

※ 製品に関するお問い合わせ

YK 山本光学株式会社

〒577-0056 大阪府東大阪市長堂3-25-8

山本光学(株)カスタマーセンター

問い合わせ先 TEL 06-6783-7818


●受付時間10～17時(土日祝日、夏季・冬季休業日を除く)

URL <http://www.swans.co.jp>

第3版

お手入れ・保管、鼻パッド調節について

ご使用後のお手入れ・保管について

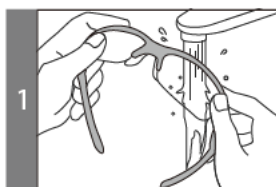


水道水で洗い流す
レンズ、フレームについた付着物を水道水で洗い流してください（浸け置き洗いはしないでください）。



水分を吸い取る
付着物を洗い流したら、残った水分を吸水性の高い柔らかい布などで押し当てるように吸い取り、陰干して自然乾燥させてください。



クロスで拭き上げる
乾燥したら眼鏡拭き用クロスなどで優しく拭き上げてください。

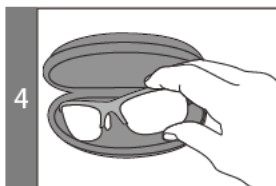

ケースに入れて保管
付属の布袋や専用ケースに入れて保管してください。

【汚れがひどい場合】

- 水道水で付着物を洗い流した後、中性洗剤を薄めた液をつけ、爪を立てないよう指の腹で撫でるように洗ってください。
 - 洗剤成分が残らないよう水道水で十分にすすぎ洗いしてください（浸け置き洗いはしないでください）。
- ※ノーズパッドやテンプルパッド等の接触部分は皮脂、整髪料、化粧品などがつきやすく劣化が早い消耗パーツです。汚れやぬめりが取れない場合はパーツ交換をご検討ください。

鼻パットの調節について



- 本製品の鼻パットはお客様の鼻幅に合わせて調節ができます。
- 鼻パット部を指でつかんで、ゆっくり幅を縮めたり、開いたりすることで、お客様の鼻幅に合わせてお使いいただけます。
- 調節の目安として、お客様の眼の位置がレンズの中央付近になるように調整していただくとレンズ性能が最大限に発揮できます。
- 調節時、眼鏡専用工具以外のご使用は、お控えください。また、無理な外圧を加えると金属部が折れる可能性がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。

注意事項について

注意（レンズやフレームの変質、破損の原因となります）

- 保管場所は高温多湿な場所（夏の車中など）は避けてください。また硬いものが直接触れないようご注意ください。
- 保管時や輸送時にケースに圧力がかったまま保管しないでください。
- ご使用後に付着物（ゴミ、砂ぼこり、海水、水垢、汗、皮脂、化粧品、日焼け止め、整髪料など）が付いたまま保管しないでください。
- 付着物がついたまま眼鏡拭き用クロスなどで擦らないでください。
- 市販されている眼鏡用クリーナー液やアルコール、除光液などは使わないでください。
- 超音波洗浄機は使わないでください。
- ドライヤー、ストーブなど高温になる機器は使わないでください。
- 温水での洗浄は行わないでください。

YK 山本光学株式会社

memo